

D) Wichtige Informationen

Wheelattack ist ein Marke der H&B Vertriebsgesellschaft mbH
Copyright © 2023.
Designed by H&B Germany
Made in China

Die Produktion unserer Wheelattack Sportstühle erfolgt in limitierter Auflage und nach höchsten Qualitätsstandards. Jeder einzelne Stuhl wird vor der Auslieferung überprüft und ist mittels einer Seriennummer identifizierbar.

Garantieleistungen:
2 Jahre auf den Rahmen
6 Monate auf Anbauteile

Die Bereifung ist von der Garantie ausgenommen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) findest Du auf unsere Webseite unter: <https://www.h-b-vertriebsgesellschaft.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen>

Revisionsstand: 2023-04-01
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Kontaktdaten:

HB | VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT

H&B Vertriebsgesellschaft mbH
Mettener Straße 48
94469 Deggendorf

Telefon: +49 (0) 173 25 10 05 5
mail@h-b-vertriebsgesellschaft.de
www.h-b-vertriebsgesellschaft.de
www.basketballrollstuhl.de



Wheelattack Basketballrollstuhl

-Bedinungsanleitung-


Inhaltsangabe:

- A) Lieferumfang & technische Daten
- B) Montage & Einstellung
- C) Sicherheitshinweise
- D) Wartung & Reinigung
- E) Wichtige Information

A) Lieferumfang & technische Daten

1. Rückenbespannung
2. Sitzbespannung
3. Sitzkissen
4. Lenkradgabel
5. Lenkrad
6. Fußstütze
7. Kippschutz
8. Antriebsrad
9. Greifreifen

Gewicht: ab 14 Kg
Maximale Belastung: 100 Kg

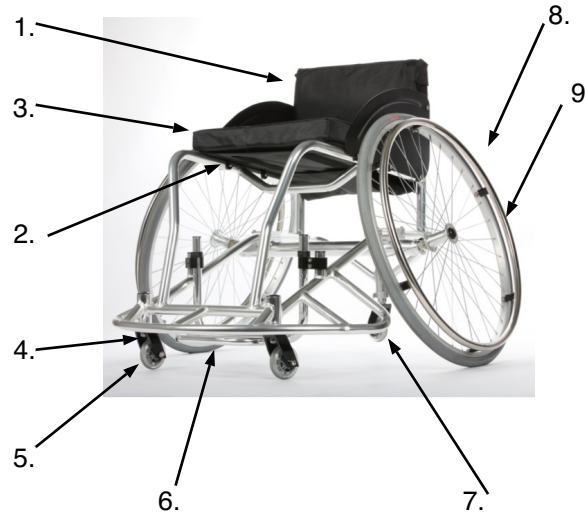

B) Montage & Einstellung

- 1) Die Montage der Antriebsräder erfolgt über die Steckachsen. Betätige dazu den Auslöseknopf am Kopf der Steckachse und schiebe diese in die Buchse an Rollstuhlrahmen. Achte darauf, dass die Achse einrastet.
- 2) Das Fußbrett kann bei Bedarf über die Klemmbolzen in der Höhe eingestellt werden. Löse dazu die Verbindung der Einsteckrohre zum Fußbügel, um Spannung aus dem System zu nehmen.
- 3) Die Rückenbespannung wird über die Klettgurte angepasst. Über eine lockerere Bespannung erhältst Du mehr Oberkörperführung und die Sitztiefe verlängert sich etwas.
- 4) Der Kippschutz lässt sich in der Höhe justieren. Stelle ihn bei Bedarf unter Belastung ein. Setze Dich zur Kontrolle der Höhe in Deinen Stuhl.

Weitere Informationen findest Du unter www.basketballrollstuhl.de

C) Sicherheitshinweise

Bei dem Wheelattack Basketballrollstuhl handelt es sich um ein Sportgerät, ausschließlich zur Ausübung von Rollstuhlbasketball.

- 1) Achte stets darauf, dass beim Einstieg ein sicherer Stand des Stuhles gewährleistet ist und der Stuhl nicht wegrollen kann.
- 2) Stell vor Gebrauch sicher, dass alle Schraubverbindungen fest verbunden sind und die Steckachsen der Antriebsräder eingerastet sind.
- 3) Ein zu geringer Luftdruck in den Antriebsrädern erschwert das Fahren und wird die Felge beschädigen. Der erforderliche Luftdruck beträgt 6 Bar.
- 4) Das Sicherheitsrad sollte im belasteten Zustand des Rollstuhles knapp über dem Boden stehen.

D) Wartung & Reinigung

- 1) Kontrolliere den Luftdruck der Antriebsräder mindestens einmal pro Woche
- 2) Kontrolliere alle Schraubverbindungen mindestens alle drei Monate
- 3) Reinige Deinen Stuhl mindestens alle drei Monate mit einem feuchten Tuch. Verwende dazu keine alkoholischen Reinigungsmittel.
- 4) Reinige die Steckachsen der Antriebsräder alle drei Monate mit einem trockenem Tuch und entferne sämtlichen Schmutz.
- 5) Reinige die Lenkrollen alle 3 Monate mit einem trockenem Tuch. Gerade hier sammeln sich oft Verunreinigungen wie Haare, die entfernt werden müssen.
- 6) Die Achsen und Lager des Stuhles müssen nicht geölt werden.
- 7) Der Bezug des Sitzkissens und die Rückenbespannung sind nicht maschinell waschbar. Reinige diese bei Bedarf von Hand.
- 8) Wende Dich an uns, wenn Dir technische Mängel auffallen oder kontaktiere eine Fachwerkstatt.